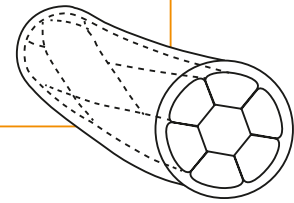




- nicht-resorbierbarer Polyamid-Faden
- sehr geschmeidig
- zugfest
- geringe Gewebereaktion
- gute Knoteneigenschaften

- *non-absorbable polyamide-suture*
- *very soft*
- *high tensile strength*
- *less tissue reaction*
- *good knotting properties*

SUPRAMID



Eigenschaften:

- überdurchschnittlich weich und geschmeidig
- sehr gute Handhabungs- und Knüpf Eigenschaften
- keine Kapillarität
- hervorragendes Gewebedurchzugsverhalten

SUPRAMID ist als monofil, nicht-resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial aus einem Copolymerisat aus Polyamid 6 und Polyamid 6.6 erhältlich. In stärkeren Durchmessern wird es als pseudomonofil

nicht-resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial aus Polyamid 6.6, einem Polymer von Hexamethylen-diamin und Adipinsäure, mit einer Beschichtung aus Polyamid 6, einem ϵ -Caprolactam-Polymer, angeboten.

Besonderheit

Trotz seiner synthetischen Herkunft, bedingt durch die peptidartige Struktur, unterliegt SUPRAMID nach längerem Verbleib im Gewebe der allmählichen Degradation und ist daher mit wenigen Ausnahmen nur für Hautnähte oder Gewebe, die keine permanenten Wundunterstützungen benötigen, geeignet.

Das Material ist mit einem physiologisch unbedenklichen Farbstoff eingefärbt.

- ➔ Farbe: weiß (ohne Farbstoff) oder schwarz
- ➔ Chemische Bezeichnung: monofil: Polyamid 6-6.6 pseudomonofil: Polyamid 6.6 und Polyamid 6
- ➔ Fadenstärke: USP 6-0 -2 (0.7-5 metric)
- ➔ Konfektionsangebote:
 - Nadel-Faden-Kombinationen
 - in vorgeschrittenen Längen
- ➔ Sterilisation: Ethylenoxid

Properties:

- above-average softness and suppleness
- superior handling and knotting properties
- no capillarity
- excellent tissue passage

SUPRAMID is available as a monofilament, non-absorbable, surgical suture made from a copolymer of polyamide 6 and polyamide 6.6.

In larger diameters, it is supplied as a pseudo-monofilament, non-absorbable, surgical suture made from polyamide 6.6, a polymer of hexamethylenediamine and adipic acid with a polyamide-6 coating, a polymer of ϵ -caprolactam.

Special feature

The peptide structure of SUPRAMID allows it to degrade gradually after it has remained in the tissue for a while, despite its synthetic origin.








This suture is therefore, with few exceptions, only suitable for skin sutures or for tissue that does not require permanent support.

The material is coloured with a physiologically harmless dye.

- ➔ Colour: white (no dye) or black
- ➔ Chemical name: monofilament: polyamide 6-6.6 pseudomonofilament: polyamide 6.6 and polyamide 6
- ➔ Thread diameter: USP 6-0 -2 (0.7-5 metric)
- ➔ Types of packaging:
 - needle-thread-combinations
 - in precut lengths
- ➔ Sterilization method: ethylene oxide





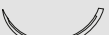

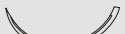

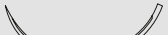

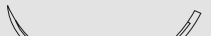

SUPRAMID

Sterile Nadel-Faden-Kombination / *needle suture combination, sterile*

Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe / colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
HRT = 1/2-Kreis schneidende Rundkörper						
<i>HRT = 1/2 circle, taper cutting</i>						
HRT 18 	4-0	1,5	0,50	schwarz / black	6061	36
	3-0	2	0,50	schwarz / black	6062	36
	4-0	1,5	0,75	schwarz / black	6063	36
	3-0	2	0,75	schwarz / black	6064	36
DR = 3/8-Kreis Rundkörper						
<i>DR = 3/8 circle, taper point</i>						
DR 18 	4-0	1,5	0,50	weiß / white	6070	36
● Schlinge / loop Tsuge-Naht / Tsuge Suture						
DRT = 3/8-Kreis schneidende Rundkörper						
<i>DRT = 3/8 circle, taper cutting</i>						
DRT 18 	4-0	1,5	0,50	weiß / white	6080	36
◉ Schlinge / loop Tsuge-Naht / Tsuge Suture						
HS = 1/2-Kreis außen schneidend						
<i>HS = 1/2 circle, reverse cutting</i>						
HS 15 	4-0	1,5	0,45	schwarz / black	6118	36
	3-0	2	0,45	schwarz / black	6119	36
	4-0	1,5	0,75	schwarz / black	61112	36
HS 18 	5-0	1	0,45	schwarz / black	6111	36
	4-0	1,5	0,45	schwarz / black	6112	36
	3-0	2	0,45	schwarz / black	6114	36
	4-0	1,5	0,75	schwarz / black	61111	36
	3-0	2	0,75	schwarz / black	6117	36
HS 20 	3-0	2	0,45	schwarz / black	61113	36
	4-0	1,5	0,75	schwarz / black	61110	36
	3-0	2	0,75	schwarz / black	6116	36
HS 22 	3-0	2	0,45	schwarz / black	6113	36
	3-0	2	0,75	schwarz / black	61114	36
	2-0	3	0,75	schwarz / black	6115	36

SUPRAMID

Sterile Nadel-Faden-Kombination / *needle suture combination, sterile*








Nadel / <i>needle</i>	Stärke / <i>gauge</i>		Länge / <i>length</i> (m)	Farbe / <i>colour</i>	Best.-Nr. <i>code no.</i>	Packungsinhalt <i>box content</i> (Stück / <i>pieces</i>)
	USP	metric				
DS = 3/8-Kreis außen schneidend DSM = mit PREMIUM-Schliff <i>DS = 3/8 circle, reverse cutting</i> <i>DSM = PREMIUM cut</i>						
DSM 11  ▼ PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	6-0	0,7	0,45	schwarz / <i>black</i>	6151	36
	5-0	1	0,45	schwarz / <i>black</i>	6152	36
DS 13  ▼	5-0	1	0,45	schwarz / <i>black</i>	6141	36
	5-0	1	0,75	schwarz / <i>black</i>	61410	36
DSM 13  ▼ PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	5-0	1	0,45	schwarz / <i>black</i>	6158	36
	4-0	1,5	0,45	schwarz / <i>black</i>	6154	36
DS 16  ▼	4-0	1,5	0,45	schwarz / <i>black</i>	61432	36
DSM 16  ▼ PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	5-0	1	0,45	schwarz / <i>black</i>	6157	36
	4-0	1,5	0,75	schwarz / <i>black</i>	6153	36
DS 18  ▼	4-0	1,5	0,45	schwarz / <i>black</i>	6142	36
	3-0	2	0,45	schwarz / <i>black</i>	6143	36
	4-0	1,5	0,75	schwarz / <i>black</i>	61428	36
	3-0	2	0,75	schwarz / <i>black</i>	61429	36
	3-0	2	6 x 0,45	schwarz / <i>black</i>	M6144 (M)	12
	4-0	1,5	0,45	weiß / <i>white</i>	61430	36
	3-0	2	0,45	weiß / <i>white</i>	61431	36
DS 18 F  ▼	4-0	1,5	0,45	schwarz / <i>black</i>	61420	36
DSM 18  ▼ PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	4-0	1,5	0,75	schwarz / <i>black</i>	6155	36
	3-0	2	0,75	schwarz / <i>black</i>	6156	36
DS 24  ▼	4-0	1,5	0,45	schwarz / <i>black</i>	6146	36
	3-0	2	0,45	schwarz / <i>black</i>	6147	36
	2-0	3	0,45	schwarz / <i>black</i>	61422	36
	3-0	2	0,75	schwarz / <i>black</i>	61425	36
	3-0	2	6 x 0,45	schwarz / <i>black</i>	M6148 (M)	12
DS 24 F  ▼	5-0	1	0,45	schwarz / <i>black</i>	61418*	36
DS 30  ▼	2-0	3	0,45	schwarz / <i>black</i>	6149	36
	0	3,5	0,45	schwarz / <i>black</i>	61423	36
	2-0	3	0,75	schwarz / <i>black</i>	61426	36
	0	3,5	0,75	schwarz / <i>black</i>	61427	36
DS 40  ▼	3-0	2	0,45	schwarz / <i>black</i>	61412	36
	2-0	2,5	0,45	schwarz / <i>black</i>	61413	36
	0	3,5	0,75	weiß / <i>white</i>	61421	36

*eventuell mit verlängerter Lieferzeit verbunden / *possibly associated with an extended delivery time*

(M) = Multipack

SUPRAMID

Sterile Nadel-Faden-Kombination / *needle suture combination, sterile*

Nadel / <i>needle</i>	Stärke / <i>gauge</i>		Länge / <i>length</i> (m)	Farbe / <i>colour</i>	Best.-Nr. <i>code no.</i>	Packungsinhalt <i>box content</i> (Stück / <i>pieces</i>)
	USP	metric				
GR = Gerade Rundkörper						
<i>GR= straight, taper point</i>						
GR 20 	5-0	1	0,45	schwarz / <i>black</i>	6091	36
	4-0	1.5	0,45	schwarz / <i>black</i>	6090	36
	4-0	1.5	0,75	schwarz / <i>black</i>	6092	36
VSPM, VSPM F = 1/4-Kreis SPATULA						
PREMIUM-Schliff						
<i>VSPM, VSPM F = 1/4 circle, spatulated, PREMIUM cut</i>						
VSPM 8   PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	4-0	1.5	0,75	weiß / <i>white</i>	6211	24
2x VSPM 8   PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	4-0	1.5	0,25	weiß / <i>white</i>	6213	24
	4-0	1.5	0,45	weiß / <i>white</i>	6214	24
2 x VSPM 8 F   PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	5-0	1	0,45	weiß / <i>white</i>	6212	24

SUPRAMID

Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschrittenen Längen / *Sterile pre-cut suture, non-needed*

Stärke / gauge USP		Länge / length (m)	Farbe / colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
4-0	1.5	3 x 0,50	schwarz / black	SAM335	24
3-0	2	3 x 0,50	schwarz / black	SAM435	24
2-0	3	3 x 0,50	schwarz / black	SAM535	24
0	3.5	3 x 0,50	schwarz / black	SAM635	24
1	4	3 x 0,50	schwarz / black	SAM735	24
4-0	1.5	3 x 0,50	weiß / white	M335	24
3-0	2	3 x 0,50	weiß / white	M435	24
2-0	3	3 x 0,50	weiß / white	M535	24
0	3.5	3 x 0,50	weiß / white	M635	24
1	4	3 x 0,50	weiß / white	M735	24
4-0	1.5	5 x 0,50	schwarz / black	SAM355	24
3-0	2	5 x 0,50	schwarz / black	SAM455	24
2-0	3	5 x 0,50	schwarz / black	SAM555	24
0	3.5	5 x 0,50	schwarz / black	SAM655	24
3-0	2	5 x 0,50	weiß / white	M455	24
2-0	3	5 x 0,50	weiß / white	M555	24
0	3.5	5 x 0,50	weiß / white	M655	24
3-0	2	10 x 0,50	schwarz / black	SAM4105	24
3-0	2	10 x 0,50	weiß / white	M4105	24
2-0	3	10 x 0,50	weiß / white	M5105	24