



Mit
austauschbaren
Einweg-
Klammernaht-
magazinen

3E-Lösung für ideale Kontrolle


- ✓ Erhöhte Sicherheit
- ✓ Effizientes Operieren
- ✓ Ergonomisches Design



Erhöhte Sicherheit

Einhand-Auslösung auf Knopfdruck, minimaler Kraftaufwand



Verbesserung der Präzision durch Minimierung der Gewebewegung, was zu einem gleichmäßigeren Schnitt, einer verbesserten Klammerformation und letztlich zu einer besseren Anastomose führt.

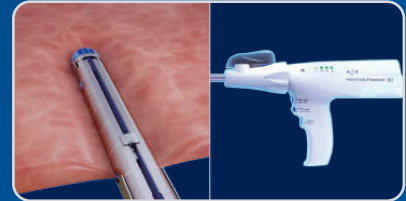


Klinge aus gehärtetem Stahl

Um 20 % härtere Klinge aus hochwertigem, rostfreiem Stahl: Das garantiert mehrfach glatte Schnitte und eine präzise Klammerlinie, was die Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht.

Schärfere Klinge (500 Hv), 97 % ohne starke Aufrauung des Gewebes: Blutungen werden reduziert.

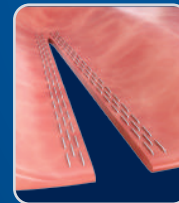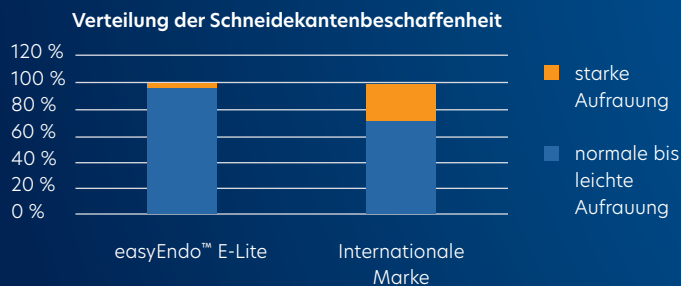

easyEndo™ E-Lite Klinge (500 Hv)


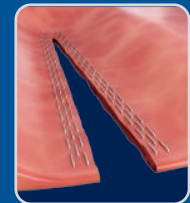


Andere (<400 Hv)

Effizientes Operieren

Leichtere Zugänglichkeit und Manövrierbarkeit


Die 60-Grad-Artikulation in beide Richtungen und die verkürzte Magazinlänge verbessern die Zugänglichkeit und Manövrierbarkeit und tragen zu einem effizienten Operieren bei.

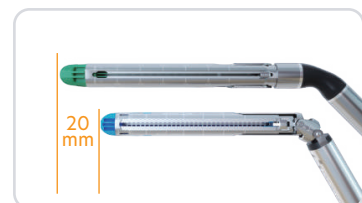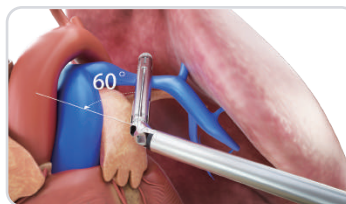

Magazinlänge 20 mm kürzer als bei den meisten Wettbewerbern in der Branche.

Abnehmbare gebogene Spitze

Diese kann bei Bedarf angebracht werden und erleichtert z.B. den Zugang unter dünne Gefäße.

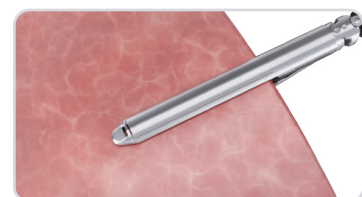

„Dieser Stapler ist wirklich handlich und stabil.
Besonders überzeugend ist die gute Klemmkraft
und die Leichtigkeit des Griffs im Vergleich
zu anderen.“ Chirurg, APHP Saint Antoine, Frankreich

600g*

Ergonomisches Design

**13,0 % – 62,5 % weniger Gewicht als bei den
in der Branche üblichen Powered Staplern.**

In Kombination mit dem ergonomischen Design des
Handgriffs verringert dies die Belastung auf das
Handgelenk und sorgt für mehr Komfort bei längerem
Gebrauch (auch bei kleineren/schmalen Händen).




*Dieses Gewicht bezieht sich auf das 60mm-Modell.

Effizientes Operieren

Verringerung der potenziellen Gewebeverletzung

Alle Magazin-Modelle können durch einen 12mm-Trokar eingebracht werden, was zum einen die
Operationskosten niedrig hält und zum anderen die potenzielle Verletzungsgefahr beim Wechsel der
Trokare verringert.


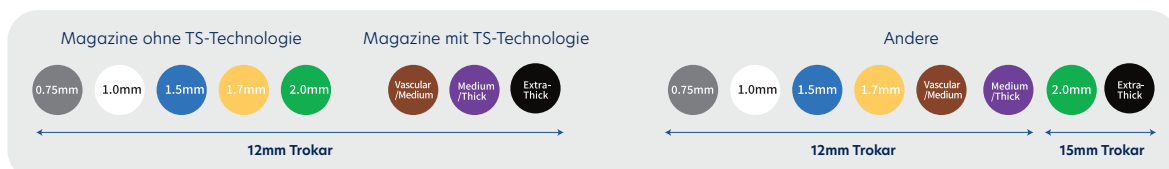


TS-Technologie:

Magazine mit drei verschiedenen
Klammerhöhen

ArcGrip:


Magazine mit seitlicher Wölbung

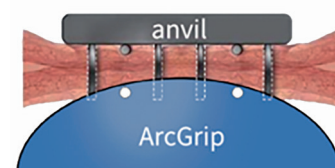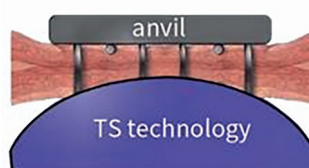



easyEndo™ E-Lite Produktübersicht

Art Nr.	Schaftlänge	Größe	VE	Stapler (Produktbeispiele)		
P2US45	260 mm	12 mm	1 Stück		P2UL45	
P2UM45	350 mm	12 mm	1 Stück			
P2UL45	440 mm	12 mm	1 Stück			
P2US60	260 mm	12 mm	1 Stück			
P2UM60	350 mm	12 mm	1 Stück			
P2UL60	440 mm	12 mm	1 Stück			
Stapler mit abnehmbarer gebogener Spitze (Curved Tip):						
P2US45G	260 mm	12 mm	1 Stück		P2UM60G	
P2UM45G	350 mm	12 mm	1 Stück			
P2UL45G	440 mm	12 mm	1 Stück			
P2US60G	260 mm	12 mm	1 Stück			
P2UM60G	350 mm	12 mm	1 Stück			
P2UL60G	440 mm	12 mm	1 Stück			

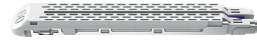Art Nr.	Farbe	Klammerhöhe: offen	geschlossen	Größe	VE	Klammernahtmagazine (Produktbeispiele)
Magazine mit dreireihiger Klammernaht:						
PN45M	Grau	2.0 mm	0.75 mm	45 mm	12 Stück	          
PN45W	Weiß	2.5 mm	1.0 mm	45 mm	12 Stück	
PN45B	Blau	3.5 mm	1.5 mm	45 mm	12 Stück	
PN45C	Gold	3.8 mm	1.7 mm	45 mm	12 Stück	
PN45G	Grün	4.1 mm	2.0 mm	45 mm	12 Stück	
PN45T	Schwarz	4.4 mm	2.3 mm	45 mm	12 Stück	
PN60M	Grau	2.0 mm	0.75 mm	60 mm	12 Stück	
PN60W	Weiß	2.5 mm	1.0 mm	60 mm	12 Stück	
PN60B	Blau	3.5 mm	1.5 mm	60 mm	12 Stück	
PN60C	Gold	3.8 mm	1.7 mm	60 mm	12 Stück	
PN60G	Grün	4.1 mm	2.0 mm	60 mm	12 Stück	
PN60T	Schwarz	4.4 mm	2.3 mm	60 mm	12 Stück	
Magazine mit seitlicher Wölbung (ArcGrip):						
PN45BC	Blau	3.5 mm	1.5 mm	45 mm	12 Stück	      
PN45CC	Gold	3.8 mm	1.7 mm	45 mm	12 Stück	
PN45GC	Grün	4.1 mm	2.0 mm	45 mm	12 Stück	
PN60BC	Blau	3.5 mm	1.5 mm	60 mm	12 Stück	
PN60CC	Gold	3.8 mm	1.7 mm	60 mm	12 Stück	
PN60GC	Grün	4.1 mm	2.0 mm	60 mm	12 Stück	
Magazine mit unterschiedlicher Klammernahthöhe (3 Reihen; TS-Technologie):						
PN45VM	Braun	2.0-2.5-3.5 mm	0.88-1.5 mm	45 mm	12 Stück	   
PN45MT	Lila	3.5-3.8-4.1 mm	1.5-2.25 mm	45 mm	12 Stück	
PN45XT	Schwarz	3.8-4.1-4.4 mm	2.25-3.0 mm	45 mm	12 Stück	
PN60VM	Braun	2.0-2.5-3.5 mm	0.88-1.5 mm	60 mm	12 Stück	
PN60MT	Lila	3.5-3.8-4.1 mm	1.5-2.25 mm	60 mm	12 Stück	
PN60XT	Schwarz	3.8-4.1-4.4 mm	2.25-3.0 mm	60 mm	12 Stück	


 Ezisurg Medical Co., Ltd., No. 399, Miaojiao Rd., Pudong New District, Shanghai, 201315, P.R. China
 Tel. +86 (21) 5045 6176, Fax +86 (21) 5067 6156, info@ezisurg.com, www.ezisurg.com


EZISURG MEDICAL

RESORBA Medical GmbH

Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

▶ resorba.com | ✉ infomail@resorba.com | ☎ +49 9128 / 91 15 0



Advanced Medical Solutions